


RESIST - 4 O.K.N.V.

**Test rapido su card per l'identificazione
e la conferma delle Carbapenemasi
(KPC, OXA-48, NDM, **VIM**) direttamente da colonia**



Biolife

Esecuzione del test

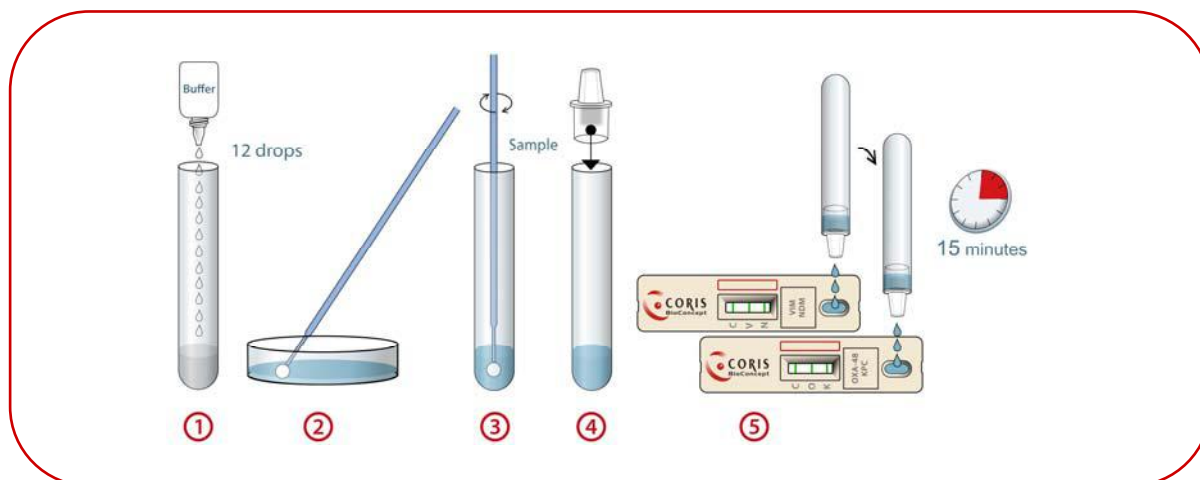

PRODOTTO	PARAMETRI	DESCRIZIONE	
REF. 96CK-15R1 OXA-48 K-SeT 20 test	OXA-48 like	20 buste contenenti la card 15 mL tampone di diluizione 20 tubi di raccolta con gocciolatore - Istruzioni per l'uso	
REF. 96CK-15R2 KPC K-SeT 20 test	KPC	20 buste contenenti la card 15 mL tampone di diluizione 20 tubi di raccolta con gocciolatore - Istruzioni per l'uso	
REF. 96CK-15R5 RESIST-3 O.K.N K-SeT 20 test	OXA-48 like KPC NDM	20 buste contenenti la card 15 mL tampone di diluizione 20 tubi di raccolta con gocciolatore - Istruzioni per l'uso	
REF. 96CK-15R8 RESIST-4 O.K.N.V K-SeT 20 test	OXA-48 like KPC NDM VIM	20 buste contenenti due card (OK e NV) 15 mL tampone di diluizione 20 tubi di raccolta con gocciolatore - Istruzioni per l'uso	

Prestazioni verso metodo molecolare (PCR e Sequenziamento)

Laboratorio di riferimento nazionale belga per Bacilli Gram-negativi Multiresistenti

	OXA-48 (n=173)	KPC (n=173)	NDM (n=119)	VIM (n=119)
Intervallo di confidenza	95%	95%	95%	95%
Specificità	100% (97.2 – 100)	100% (98.2 – 100)	100% (95.2 – 100)	100% (94.3 – 100)
Sensibilità	100% (95.7 – 100)	100% (68.4 – 100)	100% (82.8 – 100)	97.4% (84.9 – 99.9)
PPV	100% (95.7 – 100)	100% (68.4 – 100)	100% (82.8 – 100)	100% (88.6 – 100)
NPV	100% (97.2 – 100)	100% (98.2 – 100)	100% (95.2 – 100)	98.8% (92.4 – 99.9)
Concordanza	100% (173/173)	100% (173/173)	100%	99.2%



Biolife

Biolife Italiana Srl, Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel 02 25209.1; mktg@biolifeitaliana.it; www.biolifeitaliana.it

IVD

Rev. 3 02/2018